

Buddy-Loop

Material

NRX® Strap 30 mm + 2 Hakenverschlüsse

1



Nehmen Sie 2 Stück ca. 8 cm lange Straps vom NRX® 30 mm Material und schneiden Sie diese auf die gewünschte Breite zu. Passen Sie die Breite der Hakenverschlüsse an die Breite der Straps an.

2



Bringen Sie den ersten Strap proximal des Gelenks an, das die Unterstützung benötigt. Legen Sie den Strap zwischen die Finger und umwickeln Sie diese.

3



Verschließen Sie den Strap mit dem Hakenverschluss und verfahren Sie mit dem distalen Strap in gleicher Weise.

4



Testen Sie die Stabilität und falls erforderlich, justieren Sie die Spannung nach.

Pflegeanleitung

Die NRX® Straps können bei 40° C in der Waschmaschine mit einem flüssigen Schonwaschmittel gewaschen werden. Verwenden Sie immer einen Wäschesack. Entfernen Sie die Hakenteile vor dem Waschen und lassen Sie diese an der Luft trocknen.

© Mediroyal Nordic AB 2018