

Handgelenkbandage mit Schnürung

1. Wichtige Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und beachten Sie alle Hinweise sorgfältig!

- ♦ Die Orthese darf nur nach ärztlicher Anweisung sowie individueller Anpassung und Einweisung in den Gebrauch durch einen Orthopädietechniker getragen werden.
- ♦ Prüfen Sie bitte vor jedem Anlegen die Orthese auf Beschädigungen an Verschlüssen, Gurten usw.
- ♦ Beachten Sie, dass falsche Anpassung / Anwendung oder mangelhafte Kontrolle der Passform zu gesundheitlichen Schädigungen führen kann.
- ♦ Achten Sie auf die Einhaltung der Umgebungs- und Lagerbedingungen für das Produkt.
- ♦ Die Orthese ist nur für einen einzelnen Patienten verwendbar und darf nach abgeschlossener Behandlung nicht wieder verwendet werden.
- ♦ Übermäßiger Druck kann zu Durchblutungsstörungen und Hautschäden führen. Treten unter der Anwendung Beschwerden auf oder tritt eine Verschlechterung ein, dann konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädietechniker.
- ♦ Verwenden Sie das Produkt nicht bei den genannten Kontraindikationen, bei offensichtlicher Beschädigung oder Störung sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eines der genannten Materialien.
- ♦ Bei der Anwendung der Orthese an Kindern darf das Anlegen und Abnehmen der Orthese nur durch einen erwachsenen Angehörigen oder eine Pflegekraft erfolgen.
- ♦ Der Patient darf die vom Arzt oder Orthopädietechniker vorgenommenen Einstellungen der Orthese weder ändern noch irgendwelche Manipulationen vornehmen.
- ♦ Die Orthese niemals direkt auf verletzter Haut tragen.
- ♦ Bei unsachgemäßem Einsatz und unsachgemäßen Veränderungen an der Orthese ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

2. Anwendungszweck

Die Handbandage dient der Ruhigstellung und Stabilisierung des Handgelenks. Die zirkulär umschließende Handbandage wird über ein Verschlussystem aus Schnürung und Klettverschluss geschlossen. Dies ermöglicht ein leichtes Anlegen mit nur einer Hand. Eine herausnehmbare und individuell anpassbare Aluminiumschiene im Bereich der Handfläche und zwei schmale fest eingearbeitete Kunststoffschienen im Bereich des Handrückens stabilisieren das erkrankte Handgelenk. Der Daumen wird durch ein separates Klettband fixiert.

3. Indikationen

Karpaltunnelsyndrom, prä- und postoperativ nach Handgelenkverletzungen, Lähmungen, Distorsionen, entzündliche, rheumatische Erkrankungen

4. Kontraindikationen

Großflächige Hautverletzungen, Armlymphödem, arterielle Verschlusskrankheit, Unverträglichkeit mit einem der Materialien, Durchblutungs- und Sensibilitätsstörungen im Arm- und Handbereich

5. Produktkomponenten, Maße und Größen



Größe	Handgelenkumfang	Rechts	Links
XS	- 15	02 H 001	02 H 002
S	15 - 17	02 H 003	02 H 004
M	17 - 19	02 H 005	02 H 006
L	19 - 21	02 H 007	02 H 008
XL	21 -	02 H 009	02 H 010

Alle Maße in cm

6. Produktanwendung (Für Patient und Orthopädie-Techniker)

- Nehmen Sie die Bandage aus der Verpackung und öffnen Sie die Klettverschlüsse.
- Schlüpfen Sie mit der Hand unter dem Strickgewebe in die Bandage hinein. Die breite Aluminiumschiene sollte auf der Handinnenseite anliegen. Sie kann herausgenommen und individuell vom Orthopädietechniker angepasst werden.
- Nehmen Sie nun den breiten Klettverschluss, der am Ende der Schnürung angebracht ist und ziehen Sie damit über die Innen- und Unterseite des Handgelenks die Bandage fest. **Kürzen Sie den Klettverschluss mit einer Schere so, dass dieser nicht auf der Schnürung haften bleibt und diese ausfransen kann.**
- Schließen Sie nun den Klettverschluss um den Daumen und befestigen Sie ihn ebenfalls auf dem Flauschgewebe. Der Klettverschluss kann ebenfalls bei Bedarf gekürzt werden.
- Die Bandage sollte fest sitzen, so dass das Handgelenk ruhiggestellt ist und die Finger noch beweglich sind. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu Druckstellen kommt.

7. Material

Veloursleder, Polyester, Nylon, Baumwolle, Polypropylen, Aluminium

8. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

Schließen Sie alle Klettverschlüsse und nehmen die Aluschiene heraus. Waschen Sie die Bandage bei 30°C Handwäsche mit mildem Feinwaschmittel. Verwenden Sie keine scharfen Wasch- oder Bleichmittel. Bitte trocknen Sie die Bandage an der Luft und **nicht im Trockner**. Nicht bügeln.

9. Einsatzbedingungen, Lagerung und Entsorgung

Vor Verschmutzung und starkem Lichteinfluss schützen. Möglichst trocken und bei Raumtemperatur in der Originalverpackung aufbewahren. Die Orthese enthält keine umweltgefährdenden Stoffe und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

10. Bildzeichenerklärung

	Los-Nummer
	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung beachten!
	Konformität mit den Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
	Hersteller

11. Hersteller / Vertrieb:



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm
 Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289
 www.neatec.de info@neatec.de



12. Revisionsstand: Stand Januar 2013