



1- BESCHREIBUNG

Diese Knieorthese bietet höchsten Komfort und bietet Aktivität und Mobilität in Kombination mit einer leichten und eleganten Bauweise. Die M-Brace OA Knieorthese ist für die rechte und linke Seite erhältlich und verringert Knieschmerzen indem sie den Druck und das Gewicht auf das mediale oder laterale Kompartment verringert. Dies basiert auf einem Drei-Punkt-Druck System. Die Orthese besteht aus 2 halbstarren Aluminiumschienen, die am Ober- und Unterschenkel anliegen. Diese können individuell am Bein angeformt werden um so einen optimalen Sitz zu garantieren. Die Aluminiumschienen sind mit einem Gelenk verbunden, das leicht in die gewünschte Flexion und Extension eingestellt werden kann.

Bei jeder Orthese sind 3 unterschiedlich dicke Polster beigelegt, die den Druck auf das jeweilige Kompartment regeln. Die Auswahl und Positionierung der Polster sollte ausschließlich vom Orthopädietechniker vorgenommen werden. Die breite Oberfläche des Orthesenmaterials bietet einen komfortablen Schutz um das betroffene Gelenk.

Die Seitenangaben beziehen sich auf die Entlastung des medialen Kompartments.

Um das laterale Kompartment zu entlasten wählen Sie eine rechte Orthese zur Anlage am linken Bein und umgekehrt.

Gebrauch der Kompartmentpolster: (für den Orthopädietechniker)

In der Orthese ist bereits ein dünnes Polster eingelegt. Falls eine besondere Entlastung gefordert ist, wählen Sie unter den 3 beigelegten und unterschiedlich dicken Polstern das richtige aus, um die optimale Entlastung des Kompartments zu erreichen.

Die Orthese entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

2- INDIKATIONEN

- Leichte und mittelschwere mediale und laterale Gonarthrose ohne Instabilität.
- Zur Entlastung des medialen und lateralen Kompartments.
- Knorpeldefekte.