

# Gebrauchsanweisung



## NeaKarot Fingerquengelorthese

### 1. Wichtige Sicherheitshinweise:

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und beachten Sie alle Hinweise sorgfältig!**

- ◆ Die Orthese darf nur nach ärztlicher Anweisung sowie individueller Anpassung und Einweisung in den Gebrauch durch einen Orthopädietechniker getragen werden.
- ◆ Prüfen Sie bitte vor jedem Anlegen die Orthese auf Beschädigungen an Verschlüssen, Gurten usw.
- ◆ Beachten Sie, dass falsche Anpassung / Anwendung oder mangelhafte Kontrolle der Passform zu gesundheitlichen Schädigungen führen kann.
- ◆ Achten Sie auf die Einhaltung der Umgebungs- und Lagerbedingungen für das Produkt.
- ◆ Die Orthese ist nur für einen einzelnen Patienten verwendbar und darf nach abgeschlossener Behandlung nicht wiederverwendet werden.
- ◆ Übermäßiger Druck kann zu Durchblutungsstörungen und Hautschäden führen. Treten unter der Anwendung Beschwerden auf oder tritt eine Verschlechterung ein, dann konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädietechniker.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt nicht bei den genannten Kontraindikationen, bei Beschädigung oder Störung sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eines der genannten Materialien.
- ◆ Bei der Anwendung der Orthese an Kindern darf das Anlegen und Abnehmen der Orthese nur durch einen erwachsenen Angehörigen oder eine Pflegekraft erfolgen.
- ◆ Der Patient darf die vom Arzt oder Orthopädietechniker vorgenommenen Einstellungen der Orthese weder ändern noch irgendwelche Manipulationen vornehmen.
- ◆ Die Orthese niemals direkt auf verletzter Haut tragen.
- ◆ Bei unsachgemäßem Einsatz und unsachgemäßen Veränderungen an der Orthese ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

### 2. Anwendungszweck

Die Finger-Handorthese dient der Lagerung und Dehnung der Finger bei Fingerbeugekontrakturen. Die kegelförmige Orthese ist mit Polyethylenkügelchen gefüllt. Diese wird in die kontrakte Hand eingeführt, so dass die Finger in einer leichten Dehnstellung gelagert sind.

### 3. Indikationen

Starke, nicht fixierte Beugekontrakturen der Finger


### 4. Kontraindikationen

Großflächige Hautverletzungen, Armlymphöde, arterielle Verschlusskrankheit, Unverträglichkeit mit einem der Materialien, Durchblutungs- und Sensibilitätsstörungen im Arm- und Handbereich

### 5. Produktkomponenten, Maße und Größen

Die NeaKarot Orthese gibt es in Universalgröße und wird mit 2 Stäbchen geliefert.

### 6. Produktanwendung (Für Patient und Orthopädie-Techniker)

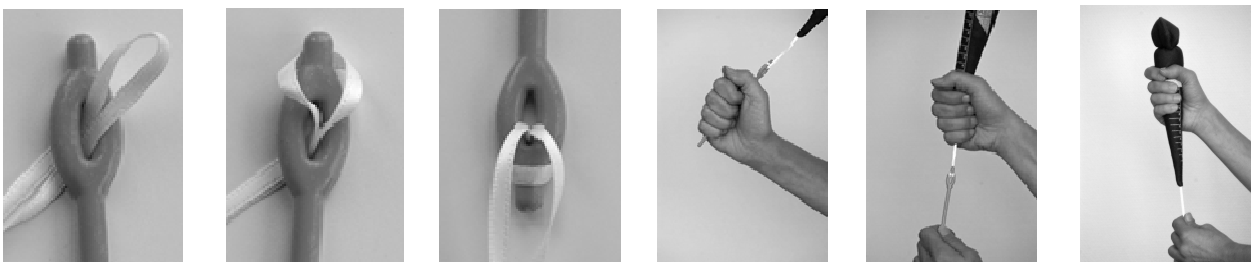

# Gebrauchsanweisung



## NeaKarot Fingerquengelorthese

- ♦ Führen Sie zuerst die Schlaufe der NeaKarot durch die Öffnung des roten Anziehhilfestäbchens und legen die Schlaufe über den Nippel.
- ♦ Drehen Sie nun das Stäbchen um 180°.
- ♦ Führen Sie nun das Stäbchen von der Daumenseite kommend durch die Faust.
- ♦ Fassen Sie das Stäbchen und ziehen es an der Seite der Kleinfingers aus der Hand heraus. Dabei schiebt sich die NeaKarot in die Hand hinein.
- ♦ Anhand einer Scala von 1 – 12 können Sie nun die erforderliche Quengelintensität ablesen.
- ♦ **Achten Sie darauf, dass sich die Fingerkuppen nicht weiß verfärben. Ziehen Sie dann die NeaKarot wieder etwas aus der Hand heraus, damit die Dehnung nachlässt.**

**Wichtiger Hinweis:** Die beigefügten Kunststoffstäbchen dürfen nur als Einführhilfe des Produktes in die Hand angewendet werden. Nicht zur Reinigung von Körperöffnungen benutzen!

### 7. Material

Baumwolle, Polyethylen

### 8. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

Die NeaKarot Orthese kann bei 30°C Handwäsche gewaschen werden. Nicht im Trockner trocknen.

### 9. Entsorgung

Die Orthese enthält keine umweltgefährdenden Stoffe und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

### 10. Bildzeichenerklärung

	Los-Nummer
<b>REF</b>	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung beachten!
<b>CE</b>	Konformität mit den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745 - Anhang IV
	Hersteller

### 11. Hersteller / Vertrieb:



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm  
Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289  
[www.neatec.de](http://www.neatec.de) info@neatec.de



### 12. V2-28/12/2020