

Gebrauchsanweisung



NeaSoft Handlagerungsorthese

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und beachten Sie alle Hinweise sorgfältig!

- Die Orthese darf nur nach ärztlicher Anweisung sowie individueller Anpassung und Einweisung in den Gebrauch durch einen Orthopädietechniker getragen werden.
- Prüfen Sie bitte vor jedem Anlegen die Orthese auf Beschädigungen an Verschlüssen, Gurten usw.
- Beachten Sie, dass falsche Anpassung / Anwendung oder mangelhafte Kontrolle der Passform zu gesundheitlichen Schädigungen führen kann.
- Achten Sie auf die Einhaltung der Umgebungs- und Lagerbedingungen für das Produkt.
- Die Orthese ist nur für einen einzelnen Patienten verwendbar und darf nach abgeschlossener Behandlung nicht wieder verwendet werden.
- Übermäßiger Druck kann zu Durchblutungsstörungen und Hautschäden führen. Treten unter der Anwendung Beschwerden auf oder tritt eine Verschlechterung ein, dann konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Orthopädietechniker.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei den genannten Kontraindikationen, bei offensichtlicher Beschädigung oder Störung sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eines der genannten Materialien.
- Bei der Anwendung der Orthese an Kindern darf das Anlegen und Abnehmen der Orthese nur durch einen erwachsenen Angehörigen oder eine Pflegekraft erfolgen.
- Der Patient darf die vom Arzt oder Orthopädietechniker vorgenommenen Einstellungen der Orthese weder ändern noch irgendwelche Manipulationen vornehmen.
- Die Orthese niemals direkt auf verletzter Haut tragen.
- Bei unsachgemäßem Einsatz und unsachgemäßen Veränderungen an der Orthese ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

2. Anwendungszweck

Die NeaSoft ist eine anpassbare Handorthese mit Auflagefläche für Hand, Finger und Daumen. Sie dient der Lagerung und Stabilisierung des Handgelenks und der Finger. Die Orthese wird mit 4 Klettbindern um den Unterarm, Hand, Finger und Daumen fixiert.

3. Indikationen

Distorsionen, nach handchirurgischen Eingriffen, Lähmungen, Arthrose und rheumatische Arthritis, Verbrennungen, Frakturen

4. Kontraindikationen

Großflächige Hautverletzungen, Armlymphödem, arterielle Verschlusskrankheit, Unverträglichkeit mit einem der verwendeten Materialien, Durchblutungs- und Sensibilitätsstörungen im Arm- und Handbereich

5. Produktkomponenten, Maße / Größen


Größe	Mittelhandmaß	Rechts	Links
S	- 8	20H001	20H002
M	8 - 10	20H003	20H004
L	10 - 12	20H005	20H006

Alle Maße in cm



6. Produktanwendung (Für Patient und Orthopädietechniker)

- Nehmen Sie die NeaSoft Handlagerungsorthese aus der Verpackung und öffnen Sie alle Verschlüsse.
- Falls der direkte Kontakt der Finger zueinander nicht gewünscht wird, benutzen Sie den Fingerdistanzhalter indem Sie diesen über die Fingerauflage der Orthese schieben. Das Gummiband sollte auf der Unterseite anliegen.
- Legen Sie Hand und Unterarm des Patienten auf die Lagerungsorthese.
- Überprüfen Sie das Handgelenk und kontrollieren Sie die eingestellte Dorsalextension der Orthese. Falls notwendig, formen Sie die Orthese vorsichtig (z. B. über einer Stuhlkante) entsprechend den Anforderungen des Patienten nach.
- Prüfen Sie die Lage des Daumens und formen Sie die Daumenauflage wenn nötig an.
- Schließen Sie die Klettverschlüsse über dem Handgelenk und dem Unterarm, so dass sie richtig sitzen, jedoch nicht zu eng sind.
- Schließen Sie nun den Klettverschluss über dem Handrücken und Fingern zwischen den Fingergrund- und -mittelgelenken. Der Verschluss wird auf der Unterseite festgeklettet.
- Schließen Sie nun den Klettverschluss um den Daumen, so dass dieser sicher auf der Daumenauflage liegt.
- Wenn Sie den Fingerdistanzhalter benutzen, achten Sie darauf, dass die Fingertrennungen zwischen die Finger gelegt werden – **Finger nicht durch die Schlaufen schieben**

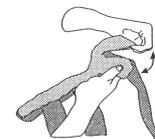

7. Material: Polyester, Stahl, PE, Nylon

8. Reinigung, Instandhaltung und Wartung

Das Innenpolster kann bei 30°C Handwäsche gewaschen werden, an der Luft trocknen und **nicht im Trockner**. Nicht bügeln. Die Kunststoffschale kann mit einer warmen Seifenlauge abgewaschen werden.

9. Entsorgung

Die Orthese enthält keine umweltgefährdenden Stoffe und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

10. Bildzeichenerklärung

	Los-Nummer
	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung beachten!
	Konformität mit den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745 - Anhang IV
	Hersteller

11. Hersteller / Vertrieb:



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm
 Fon 0731-1401280 Fax 0731-1401289
www.neatec.de info@neatec.de



12. V2-14/12/2020