

Gebrauchsanweisung

RepoCox Hüftorthese

Indikationen

Anwendung zur Stabilisierung des Hüftgelenks, des Iliosakralgelenk und der unteren Lendenwirbelsäule

Anziehenanleitung



- Wir empfehlen die Orthese über einem elastischen Anti-Thrombose-Strumpf zu tragen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe und Seite für den Patienten ausgewählt haben.
- Überprüfen Sie ob die Platte in die Innentasche des Oberschenkelteils eingesetzt ist.
- Fixieren Sie die Hüftorthese mit Hilfe des Klettverschlusses fest um die Taille. Das vertikale Oberschenkelteil der Hüftorthese sollte dabei über die Außenseite der betroffenen Hüfte und des Oberschenkels verlaufen.
- Klappen Sie nun das untere Teil nach oben und positionieren Sie die Hüftpelotte so, dass der obere Rand direkt unter dem Trochanter Major anliegt.



- Führen Sie nun das hochgeklappte Oberschenkelteil nach unten. Sie fixieren dadurch die Pelotte mit Hilfe des Klettverschlusses.
- Schließen Sie anschließend das quer verlaufende untere Teil der Hüftorthese fest um den Oberschenkel.



- Nehmen Sie nun das beiliegende Elastikband und fixieren Sie den Kreuzungspunkt des Bandes in Höhe der Pelotte. Die beiden kurzen Schlaufenenden sollten hierbei jeweils im 45° Winkel nach vorne unten bzw. hinten unten zeigen. Das lange Schlaufenende zeigt somit nach vorne oben.
- Führen Sie die beiden auf der Innenseite des Oberschenkelteils angenähten Elastikbänder jeweils durch die entsprechenden nach unten zeigenden Metallschlaufen und fixieren diese.
- Nehmen Sie nun das nach hinten führende lange Elastikband, legen es von hinten in die gegenüberliegende Taille und führen es durch die obere Metallschleufe. Fixieren Sie das Band so fest wie möglich.

Reinigung

Handwäsche in kaltem Wasser mit milder Seife
Nicht auswringen oder schleudern, nicht im Trockner trocknen.
Nicht bügeln
Mit geschlossenen Klettverschlüssen waschen

Warnung:

Verwenden Sie die richtige Größe und Seite und ersetzen Sie die Orthese bei Gewichtszunahme.

Wir empfehlen, die Orthese nachts nicht zu tragen. Entfernen Sie das innen angebrachte Etikett nicht, da dieses wichtige Informationen enthält.

Es wurden keine signifikanten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der korrekten Verwendung der Orthese festgestellt.

Medizinprodukt Klasse I – entspricht den Anforderungen der MDR 2017/745



Hersteller:



TLM srl., Via per Uboldo 48, I-21040 Gerenzano (VA)

Company with UNI EN ISO9001 and UNI EN ISO 13485 Quality Management System certified by Certiquality

Vertrieb:



neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89231 Neu-Ulm

www.neatec.de