

Gebrauchsanweisung

Xaver Lagerungsorthese

Herstellernamen: Ankle Contracture Boot

Art.Nr. 4301

HMV Nr. 23.03.01.0020

Maße und Größe

Größe	Waden- umfang	Fußumfang (Spann)	
M	36–41	23-28 cm	10 X 001
L	41- 53	28-33 cm	10 X 002
XL	41- 53	> 33 cm	10 X 003



Indikationen

- Spitzfußprophylaxe und -therapie
- Rotationskontrolle der Hüfte
- Dekubitusbehandlung und - prophylaxe
- Druckgeschwüre/Ulcera an Ferse, Sprunggelenk oder Zehen

Kontraindikationen

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Rötungen oder Reizungen der Haut und ungewöhnliche Schwellungen auftreten oder der Patient über Schmerzen in Muskeln oder Sehnen klagt.

Suchen Sie in einem dieser Fälle einen Arzt auf.

Produktanwendung (Für Patient und Orthopädie-Techniker)

- Messen Sie die Umfänge und wählen Sie die richtige Größe aus.
- Öffnen Sie alle Klettverschlüsse und beugen Sie das Knie ca. 45 Grad an.
- Legen Sie den Fuß so weit wie möglich in die Orthese. Stellen Sie sicher, dass Fußsohle und Wade auf der Orthese anliegen. Die Ferse sollte dabei freiliegen und darf den Rahmen nicht berühren.
- Legen Sie den linken Teil des Bezuges über den Spann. Dann den rechten Teil über den linken legen und mit dem Klettverschluss fixieren.
- Mit dem Verschluss über Wade und Unterschenkel verfahren Sie genauso.

Anpassen des Zehenteils und des Rotationsauslegers.

Lösen Sie den Drehknopf an der Unterseite der Sohle. Das Zehenteil auf die gewünschte Länge einstellen und den Knopf festdrehen. **Hinweis: Der Drehknopf lässt sich nicht von der Orthese lösen.**

Der Ausleger hinten an der Unterschenkelschiene, kann entsprechend der zu vermeidenden Hüftrotation nach links oder rechts ausgeklappt werden.

Befestigen und Abnehmen der Sohle

Zum Befestigen der Sohle, diese auf das Unterteil des Rahmens stellen. Die runde Öffnung in der Sohle muss sich über dem Drehknopf befinden. Die Daumen beidseitig der Öffnung anlegen, die Sohle nach unten und zur Ferse drücken. Der Drehknopf gleitet nach hinten in die Aussparung in der Sohle. Die Sohle an der Ferse herunterdrücken, bis sie einrastet. Zum Abnehmen die Finger zwischen Sohle und dem Rahmen an der Ferse legen. Die Handballen gegen die Sohle drücken und dabei die Sohle mit den Fingern vom Rahmen ziehen bis sie ausrastet. Die Sohle zu den Zehen schieben bis sich der Drehknopf auf der Höhe der runden Öffnung befindet und die Sohle abnehmen.

Wechseln des Bezugs

Zur Entnahme des Innenfutters, ziehen Sie dieses vom Zehenteil und Ausleger herunter. Öffnen Sie den Klettverschluss an der Rückseite der Ferse und ziehen Sie den Bezug nach vorne vom Kunststoffrahmen ab. Das Wadenteil ziehen Sie nach oben vom Rahmen ab. Zum Anbringen des Bezugs ziehen Sie zuerst das Wadenteil und dann das Fußteil des Bezugs über die Kunststoffschiene. Schließen Sie dann den Klettverschluss an der Rückseite der Ferse. Danach die Bezüge über den Ausleger und das Zehenteil ziehen.

Gebrauchsanweisung

Xaver Lagerungsoorthese

Herstellernamen: Ankle Contracture Boot

Art.Nr. 4301

Achtung! Die Xaver Lagerungsoorthese ist kein Schuh und somit **nicht** zum Gehen von längeren **Strecken oder zum Gehtraining geeignet. Lediglich einige wenige Schritte innerhalb geschlossener Räume im** häuslichen oder pflegerischen Bereich, wie zum Beispiel Toilettengang oder erste Schritte zur Mobilisation, können mit der Orthese zurückgelegt werden. **Vorsicht:** Beim Stehen oder Gehen mit der Orthese sollte immer eine Hilfsperson zur Stützung und Kontrolle dabei sein, da die Orthese den Fuß nicht stabilisiert! Treppen steigen ist mit der Lagerungsoorthese nicht erlaubt!

Reinigung

Alle Teile des Bezugs entfernen und die Klettverschlüsse verschließen. Den Bezug mit einem milden Waschmittel im Schonwaschgang der Waschmaschine bei 30 °C waschen. Nicht bügeln und an der Luft trocknen lassen.

Hersteller: DeRoyal Industries, P.O. Box 1015, Powell, Tennessee 37849-1015, USA

EU-Rep: Emergo Europe Princessegracht 20, 2514 AP Den Haag, Niederlande

Vertrieb: neaTec GmbH, Dieselstr. 6, 89081 Ulm www.neatec.de

